

Навіщо потрібно носити компресійний трикотаж?



розподіляє тиск на тканини нижніх кінцівок, чим сприяє стисненню вен та зменшує застій крові



діаметр вен зменшується, у результаті чого венозні клапани повноцінніше виконують свою функцію



посилює зворотнє всмоктування тканинної рідини



стимулює фібролітичну активність крові (розчинення внутрішньосудинних тромбів)



зменшує рефлюкс і покращує кровообіг

Переваги антиварикозного трикотажу PANI TERESA®



Висока медична ефективність трикотажу. Гарантоване зниження венозної недостаті за умови регулярного використання.



Pani Teresa є частиною Sigvaris Group (Швейцарія), що гарантує перевагу довгострокового досвіду, інноваційних технологій та наукової підтримки.



Вироби виготовляються з екологічно чистих матеріалів та мають антибактеріальний ефект, що запобігає виникненню неприємних запахів.



Висока міцність та зносостійкість трикотажу, яка забезпечується спеціальною професійною в'язкою, зміцненим носочком та п'яткою.



М'яка текстура трикотажу та резинок приємна на дотик, чудово пропускає повітря та відводить зайву вологу.



PANI TERESA® — це високотехнологічне виробництво антиварикозного трикотажу найвищої якості, з високою медичною ефективністю та екологічністю.

У лікуванні варикозного розширення вен нижніх кінцівок ортопедична корекція плоскостопості є необхідною.

Плоскостопість - це деформація стопи, при якій опускаються її природні склепіння, що погіршує амортизуючі властивості. Це збільшує навантаження на вени нижніх кінцівок, сприяє їх розтягненню та утворенню вузлів, через що прогресує варикоз. Також плоскостопість може викликати порушення постави, болю в хребті, колінах, що впливає на кровообіг та венозний витік.

В разі коли причиною набряку та варикозу є плоскостопість, тоді розв'язання проблеми безпосередньо залежить від:




Ортопедичне взуття

Фіксує стопи у фізіологічно правильному положенні, відновлює амортизаційну та балансувальну функцію стопи - завдяки цьому зменшує біль та дарує комфорт руху.

Ортопедичні устілки

Перерозподіляють навантаження на стопу, нормалізують біомеханіку під час руху, попереджують ускладнення варикозу (запобігають розширенню вен, зменшують набряклість, біль та важкість в ногах).

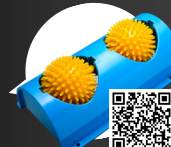

Масажери

Покращують кровообіг в ногах, зменшують набряклість, запобігають утворенню тромбів та розслабляють м'язи.



ORTOMED
HOLDING



WWW.OMH.COM.UA



СВОБОДА РУХУ - ЯКІСТЬ ЖИТТЯ!



з екологічних матеріалів



м'яка текстура



антибактеріальний ефект

міцність та зносостійкість

Ваша перемога над варикозом!



Відповідає найсуворішому європейському стандарту RAL-CZ 387, який гарантує незмінно високу якість, лікувальну ефективність трикотажу, його склад, еластичні властивості, безпечність.

Виконання замірів та підбір правильного розміру

Заміри слід виконати вранці, коли кінцівки без набряків у положенні стоячи замірюємо обидві ноги безпосередньо по оголених кінцівках, а не через одяг

	Місце заміру	Замір, см	Ваші дані	Місце заміру	Замір, см	Ваші дані
G	G	обхват верхньої частини стегна (5 см нижче промежини)	-	A-D	Висота для заміру довжини гольфів	
	F	обхват по середині стегна	-	A-T	Висота для заміру довжини колгот	
D	D	обхват під коліном (два пальці нижче коліна)	-	A-G	Висота для заміру довжини панчох	
	C	обхват в найширшому місці гомілки	-			
A	B	обхват в найвужчій частині щиколотки	-			

Правильне використання компресійного трикотажу



1. Виріб слід надягати вранці, до підйому з ліжка. Обережно зберіть виріб від верхньої частини до миска.
2. Зафіксуйте на стопі мисок і п'яту виробу.
3. Вирівняйте виріб на гомілці і нозі.
4. Рівномірно розпряміть трикотаж по стегну, щоб уникнути складок, зборок, зсувів, передавлення ділянки під коліном.

Використовуйте допоміжне пристосування для полегшення одягання компресійного трикотажу - батлер. Особливо актуальним він є для виробів 2, 3 та 4-го класу компресії. Слід зазначити, що за допомогою BUTLER можна уникнути таких неприємних наслідків, як поява затяжок і подряпин.



Відео-інструкція, як вдягати компресійний трикотаж за допомогою батлера

Догляд за компресійним трикотажем



Компресійний трикотаж **слід прати щодня**, щоб постійно підтримувати компресійні властивості. **Рекомендується прати вручну**, без пом'якшувачів та відбілювачів.



Забороно сушити вироби у вертикальному положенні, під прямими сонячними променями, на вологому рушнику, на батареї або гарячих предметах. При сушінні виріб рівномірно розвісити.



Компресійні вироби дуже чутливі до контакту з масляними мазями, кремами та маслами, тому не слід використовувати ці засоби перед надяганням виробу.

Чим небезпечний варикоз?



венозна недостатність



тромбофлебіт і флєботромбоз



трофічна виразка



венозні кровотечі

Показання до застосування:

- посилення судинного малюнку, поява "сіточки"
- тяжкість, втомлюваність ніг, набряки
- неприємні спазми щиколоток (особливо вночі)
- свербіж та печіння шкіри

Протипоказання до застосування:

- систолічний артеріальний тиск нижче 80 мм рт
- патологія артерій нижніх кінцівок (облітеруючий атеросклероз, тромбангіїт, ендартеріїт)
- цукровий діабет
- периферична нейропатія
- підвищена чутливість та алергічні реакції
- запальні процеси шкіри, при трофічних виразках із сильним мікробним забрудненням, пролежні;
- виражена серцево-легенева недостатність

Ризик виникнення варикозу



надмірна вага



робота "на ногах"



вік 40+



заняття спортом



плоскостопість



генетична схильність



гормональна терапія



куріння

Ризиком утворення тромбів та варикозного розширення вен також вважається період **вагітності та пологи**, також **операції та період тривалого перебування в лежачому положенні** (в період післяопераційного відновлення).

Як часто потрібно носити трикотаж?



Для досягнення найкращого лікувально-профілактичного результату **рекомендовано носити щодня з ранку до вечора**, знімати тільки на ніч.



Компресійні властивості компресійного антиварикозного трикотажу зберігаються впродовж 6 місяців при щоденному використанні.



Лайф-хак: для подовження терміну експлуатації до 1,5 року рекомендуємо почергово носити 2 пари компресійного трикотажу.

Вироби

PANI TERESA® CLASSIC

Стандартна лінія

1 клас/2 клас компресії

Лінійка є поєднанням медичної ефективності, міцності, високої якості та прийняттого цінового діапазону.



PANI TERESA® PREMIUM

1 клас/2 клас компресії

Трикотаж преміум-класу, який відрізняється елегантним зовнішнім виглядом, комфортним використанням та високою лікувальною ефективністю.



PANI TERESA® HOSPITAL

Спеціальна компресія - 13-18 mmHg

Панчохи цієї серії створені для застосування під час пологів, операцій та в період тривалого перебування у лежачому положенні для ефективної профілактики утворення тромбів та варикозного розширення вен.



PANI TERESA® PROFESSIONAL

2 клас компресії

Рекомендовані лікарями у всьому світі для компресійної терапії, яка є основою лікування варикозного розширення вен, лімфедими та ліпедими. Виготовлені в Швейцарії з сировини найвищої якості, що робить їх безпечними для тривалої терапії. Ефективність серії підтверджена сертифікатом RAL Німецького інституту якості та маркування.



Види виробів

Види виробів	Гольфи	Панчохи	Панчохи на поясі	Колготи	Колготи для вагітних	Чоловічі колготи
Classic	+	+	+	+	+	+
Premium	+	+	-	+	+	+
Hospital	-	+	-	-	-	-
Professional	+	+	-	+	-	-