



Дистриб'ютор
ортопедичної продукції

SIGVARIS
GROUP

Компресійні вироби SIGVARIS GROUP Польща

Pani Teresa® Medica

Компресійні вироби


Основи компресійної терапії

Серцево-судинна система




Дистриб'ютор
ортопедичної продукції

SIGVARIS
GROUP

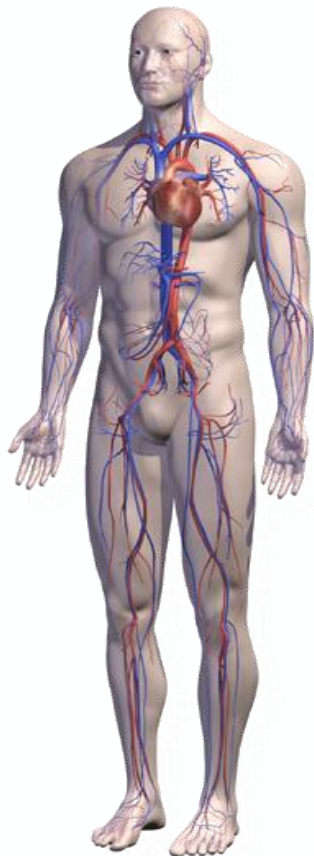


- **Серце** є основним насосом, який транспортує збагачену киснем кров до тканин по артеріях
- **Литковий м'яз** є основним насосом, який транспортує кров назад до серця через вени

Робота литкового м'яза

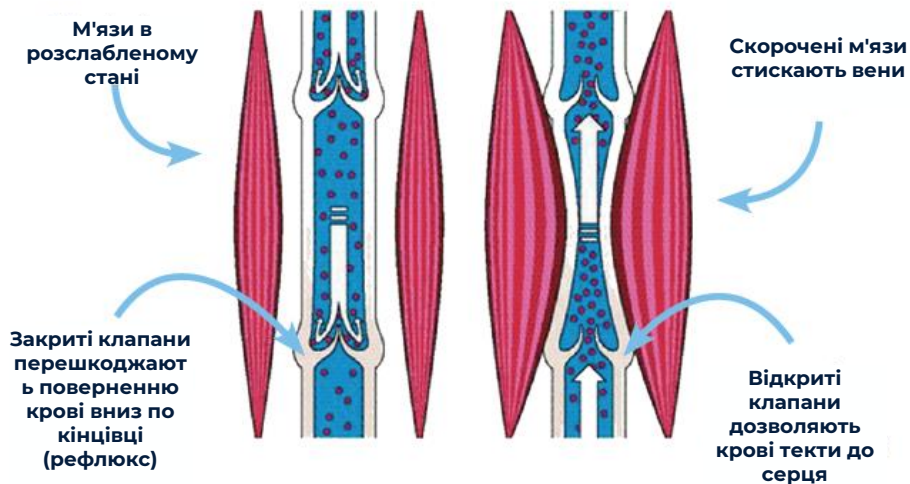

Робочі та неробочі клапани

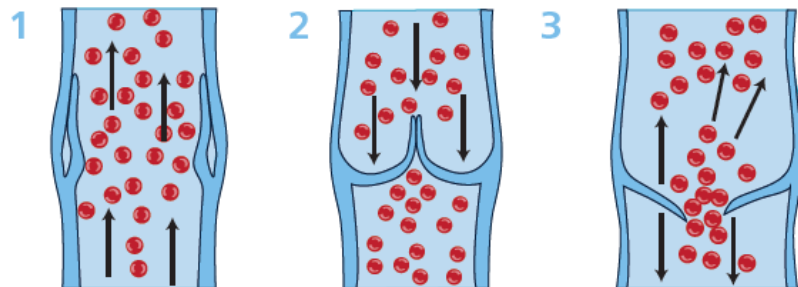

- 1. Клапан відкритий:** Кров тече до серця
- 2. Клапан закритий:** Запобігає зворотному відтоку крові вниз по кінцівці
- 3. Клапан не закритий повністю:** Зворотний потік крові, або рефлюкс, спричиняє накопичення крові в нижній кінцівці та послаблює стінки вени

Профіль пацієнта



Дистриб'ютор
ортопедичної продукції

SIGVARIS
GROUP

Показання до лікування

Хронічна венозна недостатність (ХВН)



Лікування ран



Лімфатичні та ліпідні набряки



Класифікація CEAP

C = Клінічні симптоми: (за шкалою від 0 до 6), а = без симптомів, s = із симптомами

E = Етіологія: класифікація за етіологією: вроджена, первинна, вторинна


A = Анатомія: уражені сегменти вени: поверхневі, глибокі, перфорантні вени

P = Патофізіологія: дисфункція: рефлюкс, венозний застій, рефлюкс і застій

Клінічні симптоми и C0-C6	Визначення	Коментар
C0	Відсутність видимих симптомів венозної недостатності	
C1	Павутинні та ретикулярні вени	Павутинні вени: внутрішньошкірні < 1 мм. Ретикулярні вени: підшкірні < 3 мм
C2	Варикозні вени	Підшкірні > 3 мм
C3	Лімфоедема	Затримка рідини
C4	Зміни шкіри	C4a: зміна кольору, екзема, пурпура C4b: панікуліт, ліподерматосклероз, біла атрофія
C5	Загоєна виразка	
C6	Активна виразка	



C₁: Телеангіектазії або ретикулярні вени

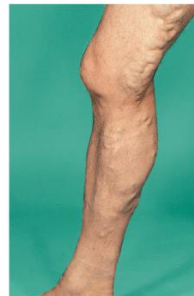

C₂: Варикозні вени



C₃: набряк і корона



C_{4a}: Пігментація або екзема



C_{4b}: Ліподерматосклероз



C₅: Шрам від виразки



C₆: Активна виразка

Види компресійних виробів



Дистриб'ютор
ортопедичної продукції

SIGVARIS
GROUP

Вироби круглої в'язки



Вироби плоскої в'язки



Нееластичні вироби



Вироби круглої в'язки



Вироби плоскої в'язки



Нееластичні вироби



Класи компресії



Дистриб'ютор
ортопедичної продукції

SIGVARIS
GROUP

CCL 1

18-21 мм рт. ст.

- Відчуття важкості, втоми в ногах зі схильністю до набряків
- Профілактика тромбозів та емболій у імобілізованих пацієнтів
- Профілактика «синдрому економ-класу» (тромбоз глибоких вен, у подорожуючих пацієнтів)
- Варикозне розширення поверхневих вен без набухання
- Варикозне розширення поверхневих вен при вагітності

CCL 2

23-32 мм рт. ст.

- Варикозне розширення вен з незначною набряккістю кінцівок
- Після лікування варикозного розширення вен (хірургічні процедури, склеротерапія, ендовенозні процедури) для підтримки його ефекту
- Тромбоз глибоких вен
- Посттромботичний синдром
- Асептичний тромбофлебіт поверхневих вен
- Після загоєння венозної виразки у пацієнтів з хронічною венозною недостатністю
- Варикоз при вагітності

CCL 3

34-46 мм рт. ст.

- Активні венозні виразки кінцівок
- Рецидивуючі венозні виразки кінцівок
- Форми прогресуючої венозної недостатності, як от ліподерматосклероз
- Оборотна лімфедема, ліпедема
- Посттравматичний синдром
- Ангідисплазія

CCL 4

мін. 49 мм рт. ст.

- Необоротна лімфедема
- Важкий посттравматичний синдром

Вироби 3 і 4 класів повинен призначати лікар

Моделі

	A-D	Гольфи	У багатьох випадках венозної недостатності гольфи можуть поліпшити стан (див. «Рекомендації») Достатні як профілактика варикозного розширення вен стегнового відділу під час вагітності. A-G або A-T
	A-G	Панчохи	Варикозне розширення вен в області стегна з недостатністю сафено-феморального сполучення (SFJ)/венозним рефлюксом та/або проблемами нижніх кінцівок Тромбоз глибоких вен стегна Тромбофлебіт поверхневих вен стегна Варикозне розширення вен в стегновому відділі під час вагітності Після хірургічного лікування варикозного розширення вен стегна (включаючи перев'язку великої підшкірної вени) Ліпідний або лімфатичний набряк стегна
	A-G	Панчохи з застібною на пояс	Як альтернатива колготкам для пацієнтів з показаннями до A-G, які не можуть/не хочуть носити панчохи з самопідтримуючою манжетой Для пацієнтів старшого віку, тому що їх легше надіти, ніж колготки Для чоловіків
	A-T	Колготки*	Для пацієнтів із показаннями до A-G, які не можуть/не хочуть носити панчохи з самопідтримуючою манжетой (наприклад, м'яка сполучна тканина, погана фіксація манжети, значний ріст волосся) Пацієнти з варикозним розширенням вен в паховій області
	A-T/U	Колготки для вагітних*	Вагітність Як альтернатива колготкам для пацієнтів з більшою ступенем вагітності

SIGVARIS
GROUP



Дистриб'ютор
ортопедичної продукції


Градуїрована компресія



Дистриб'ютор
ортопедичної продукції

SIGVARIS
GROUP

- Щоб компресійна терапія була ефективною, дуже важливо, щоб компресія була градуїованою
- Найсильніша компресія виникає навколо щиколотки і зменшується проксимально
- Градуїована компресія допомагає крові повертатися до серця

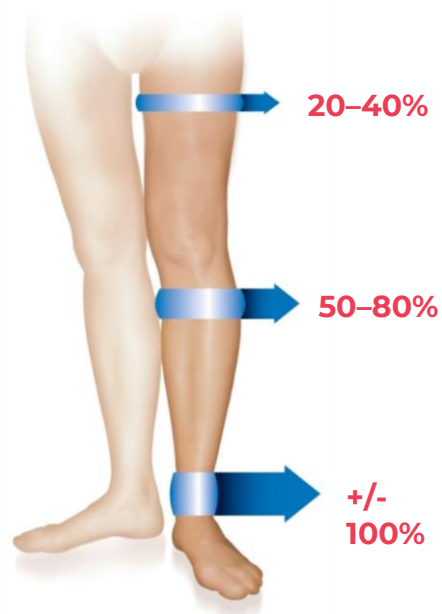



Pani TERESA[®]
MEDICA

SIGVARIS GROUP

EXPERT reGENERACJI

Klasy i elegancji!

CLASSIC
SOL

PREMIUM
COL

30 LAT
RAZEM

WSPÓŁPRACA

DOPASOWANIE DO KĄDŁOŚCI

OPRĘKA MEDYCZNA

POŁSKA PRODUKCJA

www.sklep-sigvaris.com

Асортимент продукції

PRODUCT RANGE:

CCL2 PREMIUM

CCL1 PREMIUM

CCL2 CLASSIC

CCL1 CLASSIC

CCL1 DELICATE

SOFT

TRAVEL

HOSPITAL

CCL1 Professional

CCL2 Professional



Портфоліо продукції TERESA® MEDICA PROFESSIONAL

SIGVARIS
GROUP

ЕКСПЕРТ 3 РЕГЕНЕРАЦІЯ

рекомендований спеціаліст

Медична якість

Підтверджено рекомендацією
медичної спільноти



Швейцарська якість
за доступною ціною



Рівномірно розподілений тиск
Сертифікат RAL



Комфортне носіння

Забезпечується м'яким і приємним на дотик
матеріалом, високою еластичністю та
анатомічною формою виробів



Дистриб'ютор
ортопедичної продукції


18 - 21 mmHg

PT 0445 Панчохи компресійні PROFESSIONAL CCL 1
PT 0446 Гольфи компресійні PROFESSIONAL CCL 1

23 - 32mmHg

PT 0441 Колготи компресійні PROFESSIONAL CCL 2
PT 0442 Панчохи компресійні PROFESSIONAL CCL 2
PT 0443 Гольфи компресійні PROFESSIONAL CCL 2

CCL1

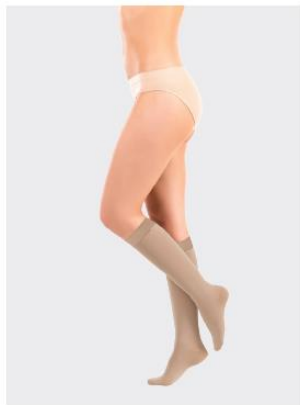

CCL2



Professional – основні переваги



ORTOMED
HOLDING

Дистриб'ютор
ортопедичної продукції

SIGVARIS
GROUP



Швейцарська,
висока
медична
якість

+

ДОСТУПНА
ЦІНА

Якість підтверджена сертифікатом RAL

Ідеальний комфорт при носінні

М'який, приємний на дотик матеріал

Високий рівень еластичності

Анатомічний дизайн

Виготовлено в Швейцарії



Хронічні захворювання вен

- поліпшення симптомів варикозного розширення вен; покращення якості життя при хронічних захворюваннях вен;
- профілактика та лікування венозних набряків та венозних уражень шкіри;
- висипи, пігментні плями;
- ліпадерматосклероз та шкірні зміни типу білої атрофії;
- профілактика виразки;
- лікування виразки та знеболення при венозних виразках ніг; варикозні вени;
- початкова фаза після лікування варикозного розширення вен;
- функціональна венозна недостатність;
- деформації вен.



Тромботичні венозні захворювання:

- тромбоз поверхневих вен;
- тромбоз глибоких вен ніг;
- стан після тромбозу;
- посттромботичний синдром;
- профілактика тромбозів у мобільних пацієнтів.



Набряки:

- лімфатичні набряки;
- набряки під час вагітності;
- набряки, спричинені виконуваною роботою;
- набряки, викликані прийомом ліків;
- посттравматичні та післяопераційні набряки;
- післяопераційні реперфузійні набряки;
- циклічні ідіопатичні набряки;
- жирові набряки до II стадії;
- застійні явища внаслідок знерухомлення.

PT 0445, PT 0446 – показання



ORTOMED
HOLDING

Дистриб'ютор
ортопедичної продукції

SIGVARIS
GROUP



Інше:

- ожиріння з функціональною венозною недостатністю;
- запалення шкіри гомілок;
- нудота, запаморочення та симптоми, пов'язані із застійними явищами під час вагітності;
- стан після опіків;
- лікування шрамів.

Компресійні вироби Pani Teresa® Medica PROFESSIONAL

 **ORTOMED**
HOLDING
Дистриб'ютор
ортопедичної продукції

SIGVARIS
GROUP



PT 0441

Колготи компресійні
PROFESSIONAL CCL 2

Розмір | S, S Plus, M, M Plus, L, L Plus

PT 0442

Панчохи компресійні
PROFESSIONAL CCL 2

Розмір | S, S Plus, M, M Plus, L, L Plus

PT 0443

Гольфи компресійні
PROFESSIONAL CCL 2

Розмір | S, S Plus, M, M Plus, L, L Plus



Без



чорний

PANI TERESA MEDICA – МЕДИЧНА КОМПРЕСІЯ

SIGVARIS
GROUP

Понад 30 років
на польському ринку
компресійних виробів



Дистриб'ютор
ортопедичної продукції



Можливість замовлення виробів
нестандартних розмірів.



Широке портфоліо, що
відповідає різноманітним
потребам пацієнтів



Перевірена сировина
Вся сировина пройшла перевірку на
біосумісність та має міжнародний
сертифікат OEKO-TEX®

Перевірена
сертифікована
сировина



Classic CCL1, CCL2 – показання



ПОКАЗАННЯ:

- функціональні розлади, як от відчуття важкості і втоми в ногах при наявній варикозній хворобі вен (C0)*
- варикозне розширення початкової стадії з низькою видимістю вен (невелике розширення поверхневих вен, венозна сітка) (C1-C2)*
- варикозне розширення вен при вагітності без набряку (C2)*
- варикозне розширення вен при вагітності з набряком (C3)*
- вечірній набряк, залежно від місцевих (венозних) причин (C3)*
- первинна варикозна хвороба вен з набряком (C3)*
- прогресуюча первинна варикозна хвороба з набряком (варикозне розширення венозних стовбурів та варикозне розширення вен бічної гілки) (C3)*
- хронічна венозна недостатність (ХВН)*

- стадії I** (C3)* мережа поверхневих вен навколо щиколоток
- стадії II** (C4)* з хронічним набряком***, екземою***, еритемою***, підшкірна***, зі склеродермією, гемосидерозом шкіри, з білою атрофією шкіри
- стадії IIIa** стадії (C5)* виликвана виразка ноги (профілактика рецидивуючого перебігу)
- профілактика тромбозу/емболії
- тромбофлебіт або запалення вен (тромбофлебіт поверхневих вен), з набряком
- тромбофлебіт (тромбоз глибоких вен)
- посттромботичний набряк із вторинною терапією або без неї
- для підтримки ефективності терапії:
 - a) після склерозування вен
 - b) після амбулаторної операції при варикозному розширенні вен
 - c) після видалення варикозних вен
- перед склерозуванням варикозних вен або перед операцією, для запобігання набряку
- профілактика виразки та терапія виразки
- післяопераційний набряк
- набряк після проходження базової терапії
- оборотна лімфоедема після комплексної фізичної деконгестантної терапії
- незворотна лімфоедема з ущільненням шкіри після комплексної фізичної деконгестантної терапії
- ліпедема II стадії і вище
- рецидивуючі ідіопатичні набряки
- емболія, викликана відсутністю руху (артритна емболія, парез і частковий парез кінцівок)
- ангіодисплазія

* за класифікацією CEAP

** Widmer & Marshall

*** після проходження базової терапії

SIGVARIS
GROUP



Дистриб'ютор
ортопедичної продукції

Classic CCL1, CCL2 – основні переваги



Дистриб'ютор
ортопедичної продукції

SIGVARIS
GROUP



Зручні та комфортні в носінні

Зменшують набряклість

Знімають відчуття важкості в ногах

Для жінок та чоловіків

Компресійні вироби Pani Teresa® Medica

CLASSIC CCL1

 **ORTOMED**
HOLDING
Дистриб'ютор
ортопедичної продукції

SIGVARIS
GROUP



PT 0407

Колготи компресійні
CLASSIC CCL 1

Розмір

S, M, L, XL



PT 0406

Панчохи компресійні
CLASSIC CCL 1

Розмір

S, M, L, XL



PT 0408

Гольфи компресійні
CLASSIC CCL 1

Розмір

S, M, L, XL



світлий беж



беж



темний беж



графіт



чорний

Компресійні вироби Pani Teresa® Medica

CLASSIC CCL1

 **ORTOMED**
HOLDING
Дистриб'ютор
ортопедичної продукції

SIGVARIS
GROUP



PT 0411

Колготи компресійні для вагітних жінок
Classic CCL1



PT 0412

Колготи компресійні чоловічі
Classic CCL1



PT 0415

Панчоха компресійна з поясом
Classic CCL1

PT 0415P - права
PT 0415L - ліва

Розмір | S, M, L, XL

Розмір | S, M, L, XL

Розмір | S, M, L, XL



світлий беж



беж



чорний

Компресійні вироби Pani Teresa® Medica

CLASSIC CCL2

 **ORTOMED**
HOLDING
Дистриб'ютор
ортопедичної продукції

SIGVARIS
GROUP



PT 0401

Колготи компресійні
CLASSIC CCL 2



PT 0403

Панчохи компресійні
CLASSIC CCL 2



PT 0405

Гольфи компресійні
CLASSIC CCL 2

Розмір | XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL

Розмір | XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL

Розмір | XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL



світлий беж



беж



темний беж



графіт



чорний

Компресійні вироби Pani Teresa® Medica

CLASSIC CCL2

 **ORTOMED**
HOLDING
Дистриб'ютор
ортопедичної продукції

SIGVARIS
GROUP



PT 0402

Колготи компресійні
для вагітних жінок
CLASSIC CCL 2



PT 0410

Колготи компресійні
чоловічі
CLASSIC CCL 2



PT 0414

Панчоха компресійна
з поясом
CLASSIC CCL 2

PT 0414P - права
PT 0414L - ліва



світлий беж



беж



чорний

Розмір | XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL

Розмір | XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL

Розмір | XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL

PREMIUM - показання



ПОКАЗАННЯ:

- функціональні розлади, як от відчуття важкості і втоми в ногах при наявній варикозній хворобі вен (C0)*
- варикозне розширення початкової стадії з низькою видимістю вен (невелике розширення поверхневих вен, венозна сітка) (C1-C2)*
- варикозне розширення вен при вагітності без набряку (C2)*
- варикозне розширення вен при вагітності з набряком (C3)*
- вечірній набряк, залежно від місцевих (венозних) причин (C3)*
- первинна варикозна хвороба вен з набряком (C3)*
- прогресуюча первинна варикозна хвороба з набряком (варикозне розширення венозних стовбурів та варикозне розширення вен бічної гілки) (C3)*
- хронічна венозна недостатність (ХВН)*

- стадії I** (C3)* мережа поверхневих вен навколо щиколоток
- стадії II** (C4)* з хронічним набряком***, екземою***, еритемою***, підшкірна***, зі склеродермією, гемосидерозом шкіри, з білою атрофією шкіри
- стадії IIIa** стадії (C5)* виликвана виразка ноги (профілактика рецидивуючого перебігу)
- профілактика тромбозу/емболії
- тромбофлебіт або запалення вен (тромбофлебіт поверхневих вен), з набряком
- тромбофлебіт (тромбоз глибоких вен)
- посттромботичний набряк із вторинною терапією або без неї
- для підтримки ефективності терапії:
 - a) після склерозування вен
 - b) після амбулаторної операції при варикозному розширенні вен
 - c) після видалення варикозних вен
- перед склерозуванням варикозних вен або перед операцією, для запобігання набряку
- профілактика виразки та терапія виразки
- післяопераційний набряк
- набряк після проходження базової терапії
- оборотна лімфоедема після комплексної фізичної деконгестантної терапії
- незворотна лімфоедема з ущільненням шкіри після комплексної фізичної деконгестантної терапії
- ліпедема II стадії і вище
- рецидивуючі ідіопатичні набряки
- емболія, викликана відсутністю руху (артритна емболія, парез і частковий парез кінцівок)
- ангіодисплазія

* за класифікацією CEAP

** Widmer & Marshall

*** після проходження базової терапії

SIGVARIS
GROUP

 **OrtoMed**
HOLDING
Дистриб'ютор
ортопедичної продукції

PREMIUM



Дистриб'ютор
ортопедичної продукції



SIGVARIS
GROUP

Компресійні вироби Pani Teresa® Medica

PREMIUM CCL 1



ORTOMED
HOLDING

Дистриб'ютор
ортопедичної продукції

SIGVARIS
GROUP



PT 0471

Колготи компресійні
PREMIUM CCL 1

Розмір I, II, III, IV, V, VI



PT 0472

Панчохи компресійні
PREMIUM CCL 1

Розмір I, II, III, IV, V, VI



PT 0473

Гольфи компресійні
PREMIUM CCL 1

Розмір I, II, III, IV, V, VI



PT 0474

Колготи компресійні
для вагітних жінок
PREMIUM CCL 1

Розмір I, II, III, IV, V, VI

*доступні кольори



світлий беж*



беж*



темний беж



графіт



чорний*

Компресійні вироби Pani Teresa® Medica

PREMIUM CCL 2



Дистриб'ютор
ортопедичної продукції

SIGVARIS
GROUP



PT 0461

Колготи компресійні
PREMIUM CCL 2

Розмір | I, II, III, IV, V, VI



PT 0462

Панчохи компресійні
PREMIUM CCL 2

Розмір | I, II, III, IV, V, VI



PT 0463

Гольфи компресійні
PREMIUM CCL 2

Розмір | I, II, III, IV, V, VI



PT 0464

Колготи компресійні
для вагітних жінок
PREMIUM CCL 2

Розмір | I, II, III, IV, V, VI

*доступні кольори



йй беж*



беж*



темний беж



графіт



чорний*

Медичні компресійні вироби Pani Teresa® Medica DELICATE CCL1

SIGVARIS
GROUP

Колготки, панчохи та гольфи Pani TERESA® MEDICA DELICATE CCL1 – це унікальне поєднання делікатної структури, що дихає, з професійною компресією першого класу.



Дистриб'ютор
ортопедичної продукції



Медичні компресійні вироби Pani Teresa® Medica

DELICATE CCL1

SIGVARIS
GROUP



PT 0431

Колготи компресійні
DELICATE CCL 1

Розмір

S, S+, M, M+, L, L+



PT 0432

Панчохи компресійні
DELICATE CCL 1

Розмір

S, M, L



PT 0433

Гольфи компресійні
DELICATE CCL 1

Розмір

S, M, L



Дистриб'ютор
ортопедичної продукції



світлий беж



беж



чорний



Дистриб'ютор
ортопедичної продукції

SIGVARIS
GROUP

ПРОФІЛАКТИКА

SOFT – показання



Дистриб'ютор
ортопедичної продукції

SIGVARIS
GROUP



Функціональні розлади, як от відчуття важкості та втоми в ногах при наявній варикозній хворобі вен (C0 за класифікацією CEAP).

SOFT – основні переваги



Приємні до шкіри

Профілактичні компресійні вироби з красивою прозорою структурою

Для кожної жінки, яка веде сидячий або стоячий спосіб життя.

Відчуття легкості в ногах

Компресійні вироби Pani Teresa® Medica SOFT

 **ORTOMED**
HOLDING
Дистриб'ютор
ортопедичної продукції

SIGVARIS
GROUP



PT 0484

Колготи компресійні
SOFT

Розмір	1, 2, 3, 4



PT 0486

Панчохи компресійні
SOFT

Розмір	1, 2, 3, 4



PT 0485

Гольфи компресійні
SOFT

Розмір	1, 2, 3, 4



світлий беж



чорний



Компресійні вироби Pani Teresa® Medica TRAVEL



ORTOMED
HOLDING

Дистриб'ютор
ортопедичної продукції

SIGVARIS
GROUP



PT 0418

Гольфи для подорожей чоловічі
TRAVEL



PT 0419

Гольфи для подорожей жіночі
TRAVEL



світлий беж



чорний

Показання:

- функціональні розлади, такі як важкість і втома ніг при варикозному розширенні вен (C0)*
* за класифікацією CEAP



TRAVEL – основні переваги



Дистриб'ютор
ортопедичної продукції

SIGVARIS
GROUP



Компресійні вироби Pani Teresa® Medica HOSPITAL

 ORTOMED
HOLDING
Дистриб'ютор
ортопедичної продукції

SIGVARIS
GROUP

Показання:

Ситуації, які збільшують ризик тромбозу:

- Під час і після операції (особливо черевної порожнини і тазу, а також в ортопедичній хірургії)
- Переломи або травми нижніх кінцівок
- Обмежена рухливість

Виріб може використовуватися пацієнтом виключно в положенні лежачи.

PT 0404

Панчохи передопераційні
HOSPITAL

Розмір

XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL

пальці відкриті



Новинка

Urban colors

URBAN STYLE



SIGVARIS
GROUP

URBAN STYLE

GOAL

Метою цієї ініціативи не є впровадження нового продукту(ів).

Як ми хочемо це зробити?

- Вихід за межі бежево-сірого медичного світу
- Підвищення привабливості пропозиції у сегменті value
- Підтримка продажів

SIGVARIS
GROUP



ORTOMED
HOLDING

Дистриб'ютор
ортопедичної продукції

URBAN STYLE

IDEA

SIGVARIS
GROUP



ORTOMED
HOLDING

Дистриб'ютор
ортопедичної продукції


**Серія лімітованих
продуктів в рамках PTM.**

Серія продуктів з
обмеженою доступністю: в
додаткових кольорах або з
принтом

Pani
TERESA[®]
MEDICA

URBAN STYLE

для кого?

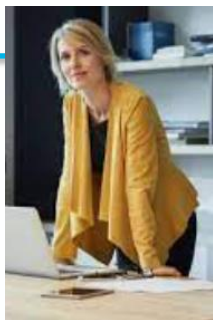

Для жінок, які попри
хворобу хочуть:

- почуватися стильними,
- почуватися привабливими,
- одягатися «модно»,
- експериментувати з вбранням.

**ЗА БУДЬ-ЯКИХ
ОБСТАВИН!**

SIGVARIS
GROUP



ORTOMED
HOLDING

Дистриб'ютор
ортопедичної продукції

URBAN STYLE

VISUAL IDENTIFICATION

SIGVARIS
GROUP



ORTOMED
HOLDING

Дистриб'ютор
ортопедичної продукції

- ✓ urban/lifestyle,
- ✓ новизна,
- ✓ сучасність,
- ✓ свіжість,
- ✓ легкість.



URBAN STYLE PRODUCTS

SIGVARIS
GROUP

 ORTOMED
HOLDING
Дистрибутор
ортопедичної продукції

- ✓ Delicate – кольори:
темно-синій і
шоколадний
- ✓ Travel: в двох кольорах:
елегантних та
консервативних водночас





ЩО НОСИТИ
У ЦЬОМУ СЕЗОНІ?
Точно щось
КОЛЬОРОВЕ!

КОЛЕКЦІЯ **CITY**
Style ЛІМІТОВАНА



ОЗНАЙОМТЕСЯ З
ЛІМІТОВАНОЮ СЕРІЄЮ
КОМПРЕСІЙНИХ МЕДИЧНИХ
ВИРОБІВ, ЯКІ ВИ ДОБРЕ
ЗНАЄТЕ

У АБСОЛЮТНО **НОВІЙ**,
БАРВИСТІЙ ВЕРСІЇ.

КОЛЕКЦІЯ **CITY**
Style ЛІМІТОВАНА

Тепер можна поєднати
КОМПРЕСІЙНУ ТЕРАПІЮ
з **МОДНИМ**
ВБРАННЯМ,



Глибокий зелений і ніжний
жовтий

в лінійці TRAVEL



Оксамитовий шовколад та елегантний
темно-синій
в лінійці DELICATE

Ідеально підходить для подорожей



Pani TERESA® MEDICA TRAVEL

Дорожні шкарпетки PT0419



Правильний
кровообіг

Для роботи стоячи або сидячи



Pani TERESA® MEDICA DELICATE CCL1 15-21 мм рт. ст.

Колготки
DELICATE CCL1
PT 0431

Гольфи
DELICATE CCL1
PT 0433

Панчохи
DELICATE CCL1
PT 0432

МОДНИЙ
MUST HAVE
цього сезону!

Делікатний
матеріал

Структура, що дихає

Професійний ефект
компресії

Q & A

ДЯКУЄМО !

SIGVARIS GROUP is dedicated
to helping people feel their best. Every day.